

*Informazioni per i pazienti*



**Muoversi meglio, Vivere meglio**

## RECUPERO DELLE CAPACITÀ MOTORIE PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA

La terapia [AMPS \(Automated Mechanical Peripheral Stimulation\)](#) erogata dal dispositivo medico GONDOLA® è efficace nel migliorare i disturbi di cammino e di equilibrio dovuti a malattie neurodegenerative come [la malattia di Parkinson e i Parkinsonismi](#) o dovuti a disturbi quali [le neuropatie periferiche](#).

La malattia di Parkinson e le neuropatie periferiche (sensitive e sensitivo-motorie) sono due delle principali cause di disturbi del movimento, **inducono una progressiva perdita delle capacità motorie e provocano una riduzione dell'indipendenza del paziente.**

Causano, inoltre, difficoltà nello svolgere attività lavorative, e costi elevati e ricorrenti per cure, trattamenti e assistenza.

**Il trattamento erogato dal dispositivo GONDOLA®, nei pazienti che hanno risposta positiva, aiuta a ottenere i seguenti benefici:**

- aumento dell'equilibrio, maggiore sicurezza nel cammino,
- riduzione della lentezza nei movimenti (bradicinesia),
- nei pazienti Parkinsoniani, riduzione dei blocchi motori e del freezing della marcia.

GUARDA  
LE TESTIMONIANZE  
PARKINSON

GUARDA  
LE TESTIMONIANZE  
NEUROPATIA



## UN EFFICACE AUSILIO TERAPEUTICO

GONDOLA® rappresenta un importante ausilio terapeutico sia nella **malattia di Parkinson**, che è sempre più diffusa, sia nelle **neuropatie periferiche**, per le quali non esistono trattamenti conosciuti.

Il trattamento AMPS erogato dal dispositivo medico **GONDOLA®** è, per questi pazienti, il primo approccio terapeutico non invasivo, non farmacologico, efficace per migliorare l'equilibrio e per aumentare stabilità e velocità di cammino, a tutto vantaggio della qualità della vita.

Consente, inoltre, di ridurre i rischi di caduta.

L'effetto del trattamento GONDOLA® è stato documentato in diversi [studi clinici e pubblicazioni scientifiche](#).

GONDOLA® risulta maggiormente efficace quando i sintomi motori sono più evidenti.

LEGGI GLI STUDI CLINICI



## PIÙ EQUILIBRIO, MIGLIORE CAMMINO

**GONDOLA®** è un dispositivo portatile ad uso personale, progettato per permettere ai pazienti di ricevere la terapia AMPS direttamente a casa.

**La AMPS si basa su stimolazioni a impulsi meccanici controllati applicate in specifiche zone di entrambi i piedi;** tali stimolazioni consentono di aumentare la trasmissione di segnali dalle periferie al sistema nervoso centrale e di migliorare la gestione degli schemi motori regolati dal sistema nervoso centrale a livello midollare e cerebrale.

**Il risultato è la riduzione dei disturbi motori e di equilibrio causati da Parkinson, Parkinsonismi e neuropatie periferiche.**



## COME VERIFICARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO GONDOLA®

Per verificare la propria risposta alla terapia AMPS è necessario prenotare una visita d'idoneità presso uno dei [Centri Specializzati GONDOLA®](#).


Durante tale visita, verificato il quadro clinico del paziente e i sintomi della malattia, viene effettuata una stimolazione AMPS con il dispositivo medico GONDOLA®.

In caso di risposta positiva, i benefici si riscontrano subito dopo la stimolazione e durano da due a cinque giorni dopo il trattamento, a seconda della malattia e della risposta del paziente.

I pazienti possono così verificare direttamente gli effetti della terapia e poi valutare se dotarsi di un dispositivo da utilizzare periodicamente a casa.

**In caso di risposta positiva, il regolare uso del dispositivo consente di mantenere i benefici nel tempo.**

**PRENOTA UNA VISITA DI IDONEITÀ**

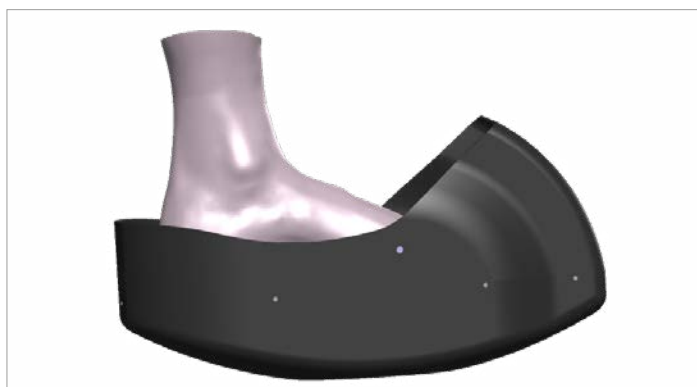

## UN DISPOSITIVO PORTATILE, DA USARE A CASA


**GONDOLA® è stato progettato e realizzato per poter essere utilizzato dal paziente a casa.**

Durante la terapia il paziente, da seduto, inserisce i piedi nel dispositivo per ricevere il trattamento AMPS.

**La terapia ha durata inferiore a 2 minuti  
e i benefici permangono fino a 5 giorni.**

**Ogni dispositivo viene personalizzato per il paziente e programmato in base alle sue caratteristiche;** la configurazione viene effettuata presso un Centro Specializzato GONDOLA®.

Il dispositivo GONDOLA® funziona con batterie ricaricabili.

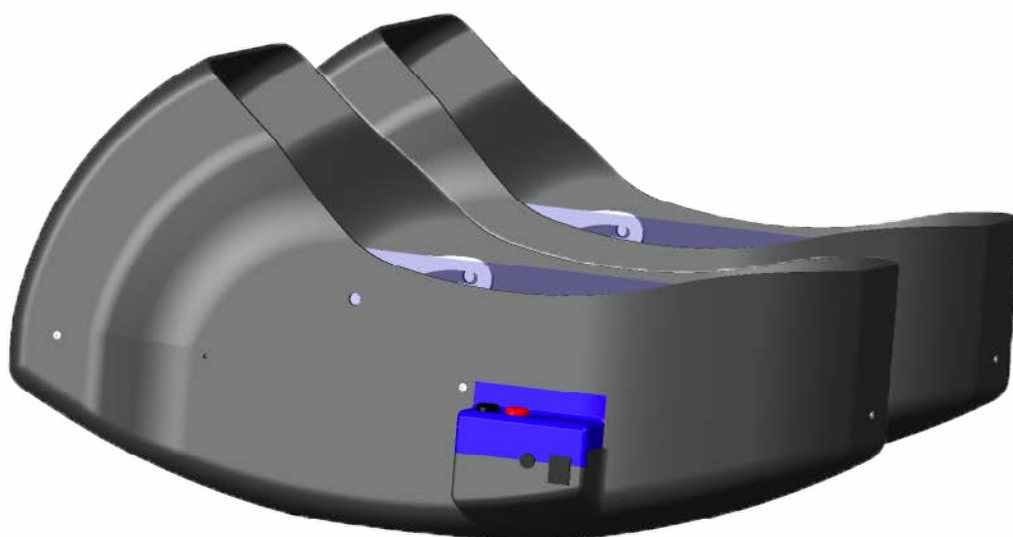



## QUALITÀ DELLA VITA

I problemi di equilibrio e di cammino derivanti da malattie neurodegenerative come **Parkinson e Parkinsonismi** o da disturbi neurologici quali le **neuropatie periferiche** che causano una **progressiva riduzione di indipendenza**.

La maggiore autonomia motoria e il ridotto rischio di cadute hanno un **impatto positivo sull'indipendenza del paziente e sulla sua qualità di vita.**

Gondola Medical Technologies SA invita a seguire sempre le terapie prescritte dal medico curante.





Muoversi meglio, Vivere meglio

GONDOLA® è un dispositivo medico CE 0476

GONDOLA® è un marchio registrato di proprietà  
di Gondola Medical Technologies SA  
Tutti i diritti sono riservati

[www.gondola-parkinson.com](http://www.gondola-parkinson.com)

**Sede Legale:**

Gondola Medical Technologies SA  
Vicolo Nassetta 2  
6900 Lugano  
SVIZZERA

**Sede operativa e produzione:**

Via Lavaggio 3 / P. O. Box 578  
6855 Stabio  
SVIZZERA

**Email:** [info@gondola.org](mailto:info@gondola.org)